



COMFIFAST EASYWRAP KOSZULKA (DZIECKO 11-14L), LECZENIE AZS, EGZEMY, ŁUSZCZYCY

CENA: **107,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: NATYCHMIAST

PRODUCENT: SYNERGYHEALTH

NUMER KATALOGOWY: CV14

KOD EAN: '

OPIS PRZEDMIOTU

COMFIFAST EASYWRAP KOSZULKA (DZIECKO 11-14L), LECZENIE AZS, EGZEMY, ŁUSZCZYCY

COMFIFAST = ULGA DLA DZIECKA, MNIEJ SWĘDZENIA, MNIEJ DRAPANIA

SKUTECZNA ODZIEŻ W LECZENIU ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY, ŁUSZCZYCY I EGZEMY JESTY WYROBEM MEDYCZNYM KLASY I UŻYWANA ODZIEŻ LECZNICZA PRZEZ ATOPIKÓW JEST IDEALNYM WSPARCIEM W LECZENIU AZS, ZMNIJSZ ZNACZNIE I REDUKUJE OBJAWY AZS, SWĘDZENIA SKÓRY.

KOSZULKA IDEALNA DO WSPARCIA W LECZENIU DERMATOLOGICZNYCH CHOROBY SKÓRY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY (AZS), ŁUSZCZYCY I EGZEMY. ODZIEŻ COMFIFAST™ EASYWRAP™ JEST PRODUKOWANA PRZY UŻYCIU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII MULTISTRETCH™. WYTRZYMAŁY I ROZCIĄGLIWY WE WSZYSTKICH KIERUNKACH MATERIAŁ NIE ZMIENIA SWOICH WŁAŚCIWOŚCI NAWET PO WIELOKROTNYM PRANIU.

TAKIE CECHY POWODUJĄ, ŻE PRODUKTY W TECHNOLOGII MULTISTRETCH™ NADAJĄ SIĘ IDEALNIE RÓWNIEŻ W ZASTOSOWANIACH RETENCJI OPATRUNKOWEJ (PRZYTRZYMUJĄ OPATRUNKI, NIE PODRAŻNIAJĄ SKÓRY, DOPASOWUJĄ SIĘ DO CIAŁA-RÓWNIEŻ DO ZNIEKSZTAŁCONYCH I Z OBRZĘKIEM, CZĘŚCI CIAŁA). STOSOWANIE OPISYWANYCH PRODUKTÓW TO SPOKOJNA NOC (BEZ DRAPANIA I ROZDRAŻNIENIA) I AKTYWNY DZIEŃ (DYSKRETNE GDY NOSZONE POD UBRANKIEM WŁAŚCIWYM, ELIMINUJĄ PODRAŻNIENIA I SĄ BARIERĄ DLA ZABRUDZEŃ I BRZDYKICH ZAPACHÓW STOSOWANYCH LEKÓW).

ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA, WYROBY Z TECHNOLOGIĄ MULTISTRETCH™ ZACHOWUJĄ SWOJE WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE, MAKSYMALNIE DO 30 PRAŃ (MAKSYMALNA TEMPERATURA PRANIA 40°C, DOZWOLONE PRANIE W PRALCE AUTOMATYCZNEJ).

KOSZULKI COMFIFAST™ EASYWRAP™ (DZIECI STARSZE 2-14 LAT), DOSTĘPNE SĄ W KILKU WARIANTACH ROZMIAROWYCH, DLA DZIECI W WIEKU OD 2 DO 5 LAT, OD 5 DO 8 LAT, OD 8 DO 11 LAT ORAZ OD 11 DO 14 LAT. WSZYSTKIE DOSTĘPNE WARIANTY ROZMIARÓW MOŻNA OBEJRZEĆ W ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ TABELI ROZMIARÓW.

W PRZECIWIENSTWIE DO KOSZULEK DLA DZIECI MNIEJSZYCH (DZIECKO 6-24M), KOSZULKI COMFIFAST™ EASYWRAP™ DLA DZIECI STARSZYCH, NIE SĄ WYPOSAŻONE W ZINTEGROWANE "RĘKAWICZKI" - KOSZULKA POSIADA DŁUGI RĘKAW, KTÓRY KOŃCZY SIĘ NA WYSOKOŚCI NADGARSTKA. W RAZIE POTRZEBY POKRYCIA OPATRUNKIEM DŁONI DZIECKA,

NALEŻY DO ZESTAWU DOKUPIĆ ODDZIELNIE OFEROWANE RĘKAWICZKI.

WAŻNE: ZOBACZ POWSZECHNIE STOSOWANĄ METODĘ LECZENIA ATOPIKÓW, ŁUSZCZYCY I EGZEMY METODĄ SUCHEGO I MOKREGO OPATRUNKU

KOSZULKI COMFIFAST™ EASYWRAP™ POLECA SIĘ SZCZEGÓLNIE PRZY STOSOWANIU METODY ZARÓWNO SUCHYCH (DRYWRAPPING) JAK I MOKRYCH OPATRUNKÓW (WETWRAPPING).

UŻYCIE ODZIEŻY COMFIFAST™ W METODZIE MOKRYCH I SUCHYCH OPATRUNKÓW (WET&DRY WRAPPING)

PRZYGOTOWANIE:

BEZPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM METODY MOKRYCH BĄDŹ SUCHYCH OPATRUNKÓW, OCZYŚĆ (NP. KĄPIEL) I WYTRZYJ SKÓRĘ. POTEM NAŁÓŻ EMOLIENTY/STERYDY LUB INNE MAŚCI NA CHORĄ SKÓRĘ. ZASIĘGNIJ PORADY LEKARZA SPECJALISTY W JAKI SPOSÓB UŻYWAĆ DODATKÓW DO KĄPIELI, MAŚCI, EMOLIENTÓW CZY TEŻ STERYDÓW.

ODZIEŻ COMFIFAST™ EASYWRAP™ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA W TAKI SPOSÓB ABY POZWOLIĆ UŻYTKOWNIKOWI PROWADZIĆ NORMALNE AKTYWNE ŻYCIE-MOŻE BYĆ NOSZONA W DZIEŃ I W NOCY ZARÓWNO POD UBRANIEM JAK I PIŻAMĄ.

MOKRY OPATRUNEK

KROK 1

POTRZEBUJESZ 2 WARSTWY ODZIEŻY COMFIFAST NA KAŻDĄ CZĘŚĆ CHOREJ SKÓRY.

KROK 2

ZMOCZ JEDNĄ Z WARSTW UBRANIA, MOCZĄC JA W MISCE Z CIEPŁĄ PRZEGOTOWANĄ WODĄ. DELIKATNIE WYCIŚNIJ, POZBYWAJĄC SIĘ NADMIARU WODY.

KROK 3

GDY JESZCZE CIEPŁA, NAŁÓŻ PIERWSZĄ MOKRĄ WARSTWĘ NA CIAŁO, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE SZWY SA NA ZEWNĄTRZ.

KROK 4

NASTĘPNIE NAŁÓŻ DRUGĄ WARSTWĘ NA CIAŁO (BEZPOŚREDNIO NA WARSTWĘ MOKRĄ-UPEWNIJ SIĘ, ŻE SZWY WARSTWY POZOSTAŁY NA ZEWNĄTRZ.

KROK 5

NOŚ JAK STANDARDOWE UBRANIE W DZIEŃ I W NOCY LUB POD UBRANIEM

SUCHY OPATRUNEK

KROK 1

POTRZEBUJESZ TYLKO 1 WARSTWY ODZIEŻY COMFIFAST NA KAŻDĄ CZĘŚĆ CHOREJ SKÓRY.

KROK 2

NAŁÓŻ PIERWSZĄ SUCHĄ WARSTWĘ NA CIAŁO, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE SZWY SĄ NA ZEWNĄTRZ.

KROK 3

NOŚ JAK STANDARDOWE UBRANIE W DZIEŃ I W NOCY LUB POD UBRANIEM

POLECAMY TEŻ FILM INSTRUKTAŻOWY WSPIERAJĄCY LECZENIE ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY METODĄ MOKRYCH OPATRUNKÓW I PRZY ZASTOSOWANIU ODZIEŻY COMFIFAST

TKANINA:

TKANINA ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ ZOSTAŁA WYPRODUKOWANA PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII MULTISTRETCH™, DZIĘKI KTÓREJ ODZIEŻ ROZCIĄGA SIĘ W DOWOLNYM KIERUNKU I DOPASOWUJE DO CIAŁA DAJĄC PEŁNIĘ SWOBODY RUCHÓW PACJENTA.


WYROBY COMFIFAST™ EASYWRAP™ MOGĄ BYĆ PRANE W PRALKACH AUTOMATYCZNYCH W TEMPERATURZE DO 60°C, NAWET 30 KROTNIE – NIE TRACĄC PRZY TYM SWOICH WŁAŚCIWOŚCI. UŻYTE MATERIAŁY SĄ LEKKIE I TAK SKOMPONOWANE, ABY NIE TRACIŁY SWOJEJ MIĘKKOŚCI NAWET PO WIELU KOLEJNO POWTARZANYCH PRANIACH.

GLÓWNE KORZYŚCI STOSOWANIA ODZIEŻY COMFIFAST™ EASYWRAP™

- DEDYKOWANE DO LECZENIA MOKRYM OPATRUNKIEM: A) REDUKCJA ŚWIĄDU, B) ZDOLNOŚCI WAZOKONSTRYKCYJNE, C) ZMNIEJSZENIE ODPOWIEDZI ZAPALNEJ;
- ZWIĘKSZAJĄ ABSORPCJĘ EMOLIENTÓW, STERYDÓW, MAŚCI - (EFEKT - 1) LEPIJ NAWILŻONA, GŁADSZA SKÓRA, 2) DŁUŻSZE DZIAŁANIE LEKU NA SKÓRĘ - REZYGNACJA Z „CIĘŻKICH” STERYDÓW;
- DZIAŁAJĄ JAK BARIERA REDUKUJĄC SIŁĘ DRAPANIA, A TAKŻE ŁAGODZĄ ŚWIĄD I ZNACZĄCO REDUKUJĄ EFEKTY DRAPANIA;
- DELIKATNE I PRZEWIENNE MATERIAŁY POZWALAJĄ SKÓRZE " ODDYCHAĆ" ORAZ OGRANICZAJĄ PRZESUSZANIE SKÓRY;
- POZWALAJĄ NA ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ HIGIENY, CHRONIĄ PRZED ZAKAŻENIAMI BAKTERYJNYMI, SĄ WIELOKROTNEGO UŻYTKU I NADAJĄ SIĘ DO PRANIA W PRALCE W TEMPERATURZE DO (60° C);
- STOSOWANA TECHNOLOGIA MULTISTRETCH POZWALA NA IDEALNE DOPASOWANIE DO SKÓRY W KAŻDYM MIEJSCU CIAŁA, NADAJE SIĘ WIĘC DO NOSZENIA POD CODZIENNYMI UBRANIAMI PRZY ZACHOWANIU PEŁNEJ SWOBODY RUCHÓW I DYSKRECJI;
- COMFIFAST OGRANICZA EMISJĘ BRZDYKIEGO ZAPACHU LEKARSTW ORAZ ZABEZPIECZA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ PRZED ZABRUDZENIEM. TŁUSTE CIĘŻKO SPIERALNE MAŚCI (LUB CZASAMI SZKODLIWE) NIE PRZENOSZĄ SIĘ NA POŚCIEL LUB UBRANIE WIERZCHNIE;
- POZOSTAJĄ NA SWOIM MIEJSCU BEZ UŻYCIA DODATKOWYCH MOCOWAŃ;
- DOSKONAŁE UZUPEŁNIAJĄ PROCES LECZENIA POPRZECZ SWOJĄ ŁATWOŚĆ W UŻYCIU, KOMFORT I EFEKTYWNOŚĆ.

Rekomendowane wymiary dla produktów Comfifast™

	A	B	C
6-24 miesiące	74-86 cm	28-34 cm	25-29,5 cm
2-5 lat	86-110 cm	34-47 cm	29,5-35,5 cm
5-8 lat	110-128 cm	47-58 cm	35,5 -42 cm
8-11 lat	128-146 cm	58-68 cm	42-49 cm
11-14 lat	146-164 cm	68-77 cm	49-57,5 cm

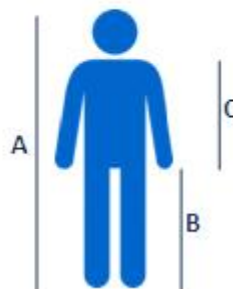

DANE TECHNICZNE:

SKŁAD: WISKOZA, NYLON, ELASTAN

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA

TY:P WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

ZASTOSOWANIE: WSPARCIE LECZENIA AZS I EGZEMY, RETENCJA UBRANIOWA